

Návod k použití

ocusers sprej hyaluron

Lipozomový oční sprej s 0,1% kyseliny hyaluronové.

Produkt je sterilní až do prvního otevření.

Aktivní látky

Fosfolipidní komplex

Hyaluronát sodný

Izotonický roztok, borát s vyrovnanou hodnotou pH 7.2

Forma a obsah

Oftalmologický roztok v 5ml/15ml rozprašovači.

Indikace

Sprej je třeba aplikovat na zavřené oči. Obsahuje kyselinu hyaluronovou. Pro hydratování, upokojení a výživu suchých očí. Vhodné i pro nositele kontaktních čoček. Kyselina hyaluronová je přírodní lubrikant, který chrání nebo upokojuje podrážděné oči kvůli nedostatku slz nebo z důvodu nošení kontaktních čoček delší dobu.

Dávkování, způsob a doba užívání

Sprej je třeba aplikovat na zavřené oči. Ocusers sprej hyaluron byl vyvinut tak, aby pokryl povrch oka postupně zvenku. Aplikujte na zavřené oko ze vzdálenosti přibližně 10 cm. Sprej neaplikujte jestli máte otevřené oči. Před prvním použitím, postláčejte aplikátor několikrát, aby se naplnil. Aplikujte jednu nebo dvě vrstvy na každé víčko. Sprej může být použit několikrát denně.

Vedlejší účinky

Pokud je aplikace v souladu s návodem k použití, nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Předávkování

Nejsou známy žádné případy předávkování.

Doba expirace a skladování

Doba expirace je uvedena vedle symbolu přesýpacích hodin. Udržujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte po době expirace vyznačené na lahvičce a vnějším obalu.

Upozornění

Držte mimo dosah dětí. Obsah lahvičky nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Nenamáhejte přímo do oka! Nepoužívejte v případě alergie nebo přecitlivělosti na jednu nebo více složek uvedených výše. Nepoužívejte produkt na vodou rozpustný makeup, protože lipozomy by mohli zanést částičky makeupu do oka.

Zdravotnický prostředek.

Distributor/ lunomedic s.r.o

Distribútor: Detva 3317
962 12 Detva,
Slovenská republika

Revízie / Revízia:
11.2018

Výrobce/ 

Výrobca: innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Köln

Service Hotline:
+49.221.467574-32
info@ocusers.eu

STERILE A

30°C
5°C  CE
0481



Návod na použitie

ocusers sprej hyaluron

Lipozómový očný sprej s 0,1% kyseliny hyalurónovej.

Produkt je sterilný až do prvého otvorenia.

Aktívne látky

Fosfolipidný komplex

Hyaluronát sodný

Izotonický roztok, borát s vyrovnanou hodnotou pH 7.2

Forma a obsah

Oftalmologický roztok v 5ml/15ml rozprašovači.

Indikácie

Sprej je potrebné aplikovať na zatvorené oči. Obsahuje kyselinu hyalurónovú. Na hydratáciu, upokojenie a výživu suchých očí. Vhodné aj pre nositeľov kontaktných šošoviek. Kyselina hyalurónová je prírodný lubrikant, ktorý chráni a upokojuje podráždené oči kvôli nedostatku slz alebo z dôvodu nosenia kontaktných šošoviek dlhšiu dobu.

Dávkovanie, spôsob a doba užívania

Sprej je potrebné aplikovať na zatvorené oči. Ocusers sprej hyaluronbol vyvinutý tak, aby pokryl povrch oka postupne zvonku. Aplikujte na zatvorené oko zo vzdialenosti približne 10 cm. Sprej neaplikujte, keď máte otvorené oči. Pred prvým použitím, postláčajte aplikátor niekoľkokrát, aby sa naplnil. Sprej môžete aplikovať niekoľkokrát denne.

Vedľajšie účinky

Ak je aplikácia v súlade s návodom na použitie, nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Predávkovanie

Nie sú známe žiadne prípady predávkovania.

Doba expirácie a skladovanie

Nepoužívajte po dobe expirácie vyznačenej na flaštičke a vonkajšom obale. Doba expirácie je uvedená vedľa symbolu presýpacích hodín. Udržujte na chladnom a suchom mieste.

Upozornenie

Držte mimo dosahu detí. Nevystavujte teplu a priamemu slnečnému žiareniu. Nepožívajte obsah balenia. Nenanášajte priamo do oka. Nepoužívajte produkt na vodou rozpustný makeup, lipozómy môžu zaniest čiastočky makeupu do oka. Nepoužívajte v prípade alergie alebo precitlivenosti na jednu alebo viac uvedených zložiek vyššie.

Zdravotnícka pomôcka.

Distribútor / lunomedic s.r.o

Distribútor: Detva 3317
962 12 Detva,
Slovenská republika

Revízie / Revízia:
11.2018

Výrobca / 

Výrobca: innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Köln

Service Hotline:
+49.221.467574-32
info@ocusers.eu

STERILE A

5°C  30°C  0481