



Návod k použití

ocusers sprej lipostamin

Oční sprej s lipozomy a aeufrazií lékařskou.

Produkt je sterilní až do prvního otevření.

Aktivní látky

Fosfolipidný komplex

Rostlinné extrakty z:

Capparis spinosa, Helychrysum italicum, Euphrasia officinalis, Glycyrrhiza glabra

Izotonický roztok, borát s vyrovnanou hodnotou pH 7.2

Forma a obsah

Oftalmologický roztok v 5ml/15ml rozprašovači.

Indikace

Sprej se základem z lipozomů a rostlinných extraktů, které mají ulevit při podráždění očí pylem, prachem nebo jinými externími faktory, je třeba aplikovat na zavřené oči a víčka. Pokud je sprej používán pravidelně, vytvoří se na povrchu oka tenká ochranná vrstva, která zabrání podráždění očního povrchu alergény.

Dávkování, způsob a doba užívání

Sprej aplikujte na zavřené oči ze vzdálenosti přibližně 10 cm. Opakujte několikrát denně nebo podle potřeby. Před prvním použitím, postáčejte aplikátor několikrát, aby se naplnil.

Vedlejší účinky

Pokud je aplikace v souladu s návodem k použití, nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Předávkování

Nejsou známy žádné případy předávkování.

Doba expirace a skladování

Nepoužívejte po době expirace vyznačené na lahvičce a vnějším obalu. Doba expirace je uvedena vedle symbolu přesýpacích hodin. Udržujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Držte mimo dosahu dětí. Obsah lahvičky nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte obsah balení. Nepoužívejte v případě alergie nebo přecitlivělosti na jednu nebo více složek uvedených výše. Nepoužívejte produkt na vodu rozpustný makeup, protože lipozomy by mohli zanést částičky makeupu do oka.

Zdravotnický prostředek.

Distributor/ lunomedic s.r.o

Distribútor: Detva 3317
962 12 Detva,
Slovenská republika

Revízie / Revízia:
11.2018

Výrobce/ 

Výrobca: innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Köln

Service Hotline:
+49.221.467574-32
info@ocusers.eu

STERILE A

5°C  30°C  0481



Návod na použitie

ocovers sprej lipostamin

Očný sprej s lipozómami a očiankou lekárskou.

Produkt je sterilný až do prvého otvorenia.

Aktívne látky

Fosfolipidný komplex

Rastlinné extrakty z:

Capparis spinosa, Helychrysum italicum, Euphrasia officinalis, Glycyrrhiza glabra

Izotonický roztok, borát s vyrovnanou hodnotou pH 7.2

Forma a obsah

Oftalmologický roztok v 5ml/15ml rozprašovači.

Indikácie

Sprej so základom z lipozómov a rastlinných extraktov, ktoré majú uľaviť pri podráždení očí peľom, prachom alebo inými externými faktormi je potrebné aplikovať na zatvorené oči a viečka. Ak je sprej používaný pravidelne, vytvorí sa na povrchu oka tenká ochranná vrstva, ktorá zabráni podráždeniu očného povrchu alergénmi.

Dávkovanie, spôsob a doba užívania

Sprej aplikujte na zatvorené oči zo vzdialenosti približne 10 cm. Opakujte niekoľkokrát denne alebo podľa potreby. Pred prvým použitím, postláčajte aplikátor niekoľkokrát, aby sa naplnil.

Vedľajšie účinky

Ak je aplikácia v súlade s návodom na použitie, nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Predávkovanie

Nie sú známe žiadne prípady predávkovania.

Doba expirácie a skladovanie

Nepoužívajte po dobe expirácie vyznačenej na fľaštičke a vonkajšom obale. Doba expirácie je uvedená vedľa symbolu presýpacích hodín. Udržujte na chladnom a suchom mieste.

Upozornenie

Držte mimo dosahu detí. Nevystavujte teplu a priamemu slnečnému žiareniu. Nepožívajte obsah balenia. Nepoužívajte v prípade alergie alebo precitliveneosti na jednu alebo viac zložiek uvedených vyššie. Nepoužívajte produkt na vodou rozpustný makeup, lipozómy môžu zaniest čiastočky makeupu do oka.

Zdravotnícka pomôcka.

Distribútor / lunomedic s.r.o

Distribútor: Detva 3317
962 12 Detva,
Slovenská republika

Revízie / Revízia:
11.2018

Výrobca / 

Výrobca: innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Köln

Service Hotline:
+49.221.467574-32
info@ocovers.eu

STERILE A

 30°C
5°C  0481