



Návod na použitie

ocusers drops B5

ocusers drops B5 je sterilný, viskózný, číry, zvlhčujúci a výživný roztok na báze provitamínu B5. Jeho zložka provitamín B5 napomáha a podporuje samoregeneračné schopnosti rohovky. Mukoadhezívny účinok Hydra-Flexu zachováva slznú vrstvu, takže oko je lepšie chránené. Tento produkt neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

ocusers drops B5 chráni oko pred pocitom suchosti, unavených a podráždených očí. Kvapnutím niekoľkých kvapiek do oka sa pocit nepohodlia zmierni alebo úplne odstráni.

Kvapky **ocusers drops B5** možno používať bez obmedzenia a dobre sa tolerujú.

Zloženie:

Aktívna látka: Dexpanthenol 2 %, Hydriflex 0,5 %

Konzervačná látka: polyhexanid 0,0001 %

Indikácie:

V prípade, že máte v očiach pocit pichania, pálenia alebo vás trápia červené či unavené oči. Môže to byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane podráždenia z nosenia kontaktných šošoviek, intenzívneho pozerania na obrazovku, dlhodobej jazdy autom alebo na motorke, klimatizáciou, vetrom, znečistením vzduchu, vodou z bazéna a pod.

Pokyny na používanie:

ocusers drops B5 môžete kvapnúť do očí dvomi rôznymi spôsobmi: priamo do očí alebo pomocou kontaktných šošoviek.

Aplikácia priamo do očí:

(V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, pokojne si ich môžete nechať v očiach.)

Ukazovákom si chyťte spodné viečko a potiahnite ho mierne nadol. Druhou rukou si môžete priložiť fľaštičku nad spodné viečko. Dbajte na to, aby sa fľaštička nedostala do kontaktu s okom!

Kvapnite 1 alebo 2 kvapky do oka a okom 2-krát alebo 3-krát zažmurkajte, aby ste umožnili rovnomerné nanesenie na oko.

Aplikácia cez kontaktné šošovky (pokiaľ Vám to viac vyhovuje):

Šošovky si dajte na prostredník.

Kvapnite 1 alebo 2 kvapky na šošovku a potom si vložte šošovku do oka.

Okom 2-krát alebo 3-krát žmurknite.

Upozornenia: ⚠

Aplikujte podľa pokynov v návode na použitie.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Skladujte pri teplote od 15°C do 25°C.

V prípade podráždenia oka prestaňte kvapky používať a poraďte sa s lekárom alebo špecialistom na kontaktné šošovky.

Nepoužívajte po dátume expirácie.

Fľaštičku pevne uzavrite hneď po použití.

Spotrebujte do 2 mesiacov od otvorenia.

Vedľajšie účinky:

Nepoužívajte ocusers drops B5, ak máte alergiu na niektorú zložku.

Distribútor:

Iunomedic s.r.o.

Detva 3317

962 12 Detva, Slovenská republika


Výrobca:



innomedis ag

Walther-Rathenau-Str. 5

D-50996 Köln

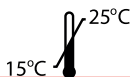

0481





Návod k použití

ocovers drops B5

ocovers drops B5 je sterilní, viskózní a čirý roztok se zvlhčujícím a vyživujícím účinkem založený na provitamínu B5. Obsažený provitamin B5 stimuluje a podporuje přirozené regenerační schopnosti rohovky. Mukoadhezivní účinek HydraFlexu zachovává slzný film a zajišťuje tak očím lepší ochranu. Výrobek neobsahuje složky živočišného původu.

ocovers drops B5 zabraňuje očním potížím, jako je pocit suchosti a v případě unavených, podrážděných očí. Po aplikaci několika kapek se nepříjemné pocity v oku zmírní nebo zcela odezní.

Přípravek **ocovers drops B5** lze používat bez omezení a je velmi dobře snášen.

Složení:

Aktivní látka: 2% dexpanthenol, 0,5% HydraFlex

Konzervační látka: 0,0001% polyhexanid

Indikace:

Pokud vás oči pálí a štípou nebo máte potíže s červenými či unavenými očima, příčinou mohou být různé faktory, například: podráždění způsobené kontaktními čočkami, intenzivní sledování obrazovky, dlouhodobá jízda autem nebo na motocyklu, klimatizace, vítr, znečištěné ovzduší, voda v bazénu atd.

Návod k použití:

Přípravek **ocovers drops B5** můžete do očí aplikovat dvěma různými způsoby: přímo do očí, nebo pomocí kontaktních čoček.

Aplikace přímo do očí:

(Pokud nosíte kontaktní čočky, můžete si je bez problémů nechat.)

Položte ukazováček na spodní víčko a mírně ho stáhněte dolů. Druhou rukou uchopte lahvičku a přidržte ji nad spodním víčkem. Dbejte, aby se lahvička oka nedotýkala!

Kápněte do oka 1–2 kapky a 2- až 3krát zamrkejte, aby roztok pokryl rovnoměrně celé oko.

Aplikace pomocí kontaktních čoček (pokud vám to více vyhovuje):

Položte si kontaktní čočku na prostředník.

Kápněte na ni 1–2 kapky a pak si vložte čočku do oka.

2–3krát zamrkejte.

Varování: ⚠

Postupujte dle pokynů v návodu k použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte při teplotě od 15°C do 25°C.

V případě podráždění očí přestaňte přípravek používat a poradte se s lékařem / specialistou na kontaktní čočky.

Nepoužívejte po době použitelnosti.

Po použití lahvičku ihned pevně uzavřete.

Po otevření spotřebujte do 2 měsíců.

Vedlejší účinky:

Přípravek ocovers drops B5 nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou jeho složku.

Distributor:

Iunomedic s.r.o.

Detva 3317

962 12 Detva, Slovenská republika

Výrobce:



innomedis ag

Walther-Rathenau-Str. 5

D-50996 Köln



0481

