

Product name: ocuvers drops GEL CZ / SK  
Project number: 800024\_PIL\_REV02\_20190703  
Project date: 2019-07-03  
Chosen colours: Black  
Die cut size: 100 x 150 mm



## ocuvers drops Gel

**Oční kapky na bázi hyaluronátu sodného 0,3% pro hydrataci, upokojení a výživu suchých očí.**

### PŘÍBALOVÝ LETÁK / POUŽITÍ

ocuvers gelové kapky jsou sterilní až do doby prvního otevření.

#### Složení

Aktivní látky: kyselina hyaluronová (ve formě hyaluronátu sodného) 0,3%  
Pomocné látky: kyselina boritá (konzervant), tetraborát sodný (konzervant), chlorid sodný, EDTA, Microglycin 50, deionizovaná voda

#### Forma a obsah

Sterilní oční kapky  
10 ml fľaštička

#### Indikace

ocuvers drops Gel se doporučují v případě podrážděných nebo suchých očí z důvodu nadměrného používání kontaktních čoček, environmentálních faktorů (prach, smog, pel), nedostatečného slzení oka, po dobu období menopauzy nebo po chirurgickém zákroku oka. ocuvers gelové kapky se také doporučují pro efektivní lubrikaci a opakované vlhčení kontaktních čoček pro komfortnější pocit při nošení čoček.

#### Dávkování, postup a doba používání

V případě suchých očí:  
Nakapejte jednu nebo dvě kapky ocuvers gelových kapek do každého oka podle potřeby.

Pro uživatele kontaktních čoček:  
Před nasazením čočky kápněte malou kapku ocuvers gelových kapek do vnitřní části kontaktní čočky. V případě, že aplikace kontaktních čoček způsobuje nepříjemný pocit cizího tělesa v oku, mohou se oční kapky použít i na čočku po dobu jejího nošení.



#### Výrobce

innomedis AG  
Walther-Rathenau-Str. 5  
D-50996 Cologne  
Germany

Status: 07.2019

#### Distributor

lunomedic s.r.o.,  
Detva 3317,  
962 12 Detva,  
Slovakia

#### Vedlejší účinky

Při použití podle návodu na použití nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.

#### Datum expirace a skladování

Nepoužívejte po datu expirace vyznačeném na lahvičce a obalu. Ten je vyznačen vedle symbolu přesýpacích hodin. Produkt spotřebujte do 6 měsíců od prvního otevření a lahvičku pevně uzavírejte. Nevystavujte mrazu, zdrojům tepla a přímému světlu.

#### Upozornění

- Produkt nepoužívejte, pokud je před prvním otevřením uzávěr poškozen.
- Nikdy nepřikládejte špičku kapátka k jiným povrchům, abyste se vyhnuli kontaminaci produktu.
- Skladujte mimo dosahu dětí.
- Nepoužívejte v případě přecitlivění na jakoukoliv složku produktu.
- Přestaňte používat produkt a kontaktujte svého očního lékaře, pokud se objeví bolest oka, změny vidění, nepřetržité začervenání nebo podráždění oka.
- Skladujte mimo zdrojů tepla a přímého světla.
- Není určen pro vnitřní použití.

#### Zdravotnický prostředek

STERILE 

5°C 

30°C 

  
0481

800024\_PIL\_REV02\_20190703



## ocuers drops Gel

**Očné kvapky na báze hyaluronátu sodného 0,3% pre hydratáciu, upokojenie a výživu suchých očí.**

### PRÍBALOVÝ LETÁK / POUŽITIE

ocuers gélové kvapky sú sterilné až po dobu prvého otvorenia.

#### Zloženie

Aktívne látky: kyselina hyalurónová (vo forme hyaluronátu sodného) 0,3%  
Pomocné látky: kyselina boritá (konzervant), tetraborát sodný (konzervant), chlorid sodný, EDTA, Microglycín 50, deionizovaná voda

#### Forma a obsah

Sterilné očné kvapky  
10 ml fľaštička

#### Indikácie

ocuers drops Gel sa odporúčajú v prípade podráždených alebo suchých očí z dôvodu nadmerného použitia kontaktných šošoviek, environmentálnych faktorov (prach, smog, peľ), nedostatočného slzenia oka, počas obdobia menopauzy alebo po chirurgickom zákroku oka. ocuers gélové kvapky sa taktiež odporúčajú pre efektívnu lubrikáciu a opakované vlhčenie kontaktných šošoviek pre komfortnejší pocit pri nosení šošoviek.

#### Dávkovanie, postup a doba používania

V prípade suchých očí:  
Nakvapkajte jednu alebo dve kvapky ocuers gélových kvapiek do každého oka podľa potreby.

Pre používateľov kontaktných šošoviek:  
Pred nasadením šošovky kvapnite malú kvapku ocuers gélových kvapiek do vnútornej časti kontaktnej šošovky. V prípade, že aplikácia kontaktných šošoviek spôsobuje diskomfort (pocit cudzieho telesa v oku) sa môžu očné kvapky použiť aj na šošovku počas jej nosenia.



#### Výrobca

innomedis AG  
Walther-Rathenau-Str. 5  
D-50996 Cologne  
Germany

Status: 07.2019

#### Distribútor

lunomedic s.r.o.,  
Detva 3317,  
962 12 Detva,  
Slovakia

#### Vedľajšie účinky

Pri použití podľa návodu na použitie neboli zistené žiadne vedľajšie účinky.

#### Dátum expirácie a skladovanie

Nepoužívajte po dátume expirácie vyznačenom na fľaštičke a obale. Ten je vyznačený vedľa symbolu presýpacích hodín. Produkt spotrebujte do 6 mesiacov od prvého otvorenia a fľaštičku pevne uzatvárajte. Nevystavujte mrazu, zdrojom tepla a priamemu svetlu.

#### Upozornenie

- Produkt nepoužívajte ak je pred prvým otvorením uzáver poškodený.
- Nikdy neprikladajte špičku kvapkadla k iným povrchom, aby ste sa vyhli kontaminácii produktu.
- Skladujte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte v prípade precitlivosti na akúkoľvek zložku produktu.
- Prestaňte používať produkt a kontaktujte svojho očného lekára ak sa objaví bolesť oka, zmeny videnia, nepretržité začervenanie alebo podráždenie oka.
- Skladujte mimo zdrojov tepla a priameho svetla.
- Nie je určený pre vnútorné použitie.

#### Zdravotnícka pomôcka

STERILE | A



5°C  30°C

  
0481