

Product name: ocucvers drops RELIEF CZ / SK
Project number: 800025_PIL_REV03_20190709
Project date: 2019-07-09
Chosen colours: Black
Die cut size: 148 x 184 mm



ocucvers drops Relief

Oční kapky s obsahem hyaluronátu sodného 0.21%

Složení

Sterilní izotonický roztok s obsahem čišťené vody, chloridu sodného, chloridu vápenatého, chloridu hořečnatého, fosforečnanu sodného, citrátu, konzervant sorbitolu a hyaluronátu sodného 2,1 mg/ml. Neobsahuje BPA (bisfenol A), ftalátz ani borátové konzervanty.

Bez konzervantů

Forma a obsah

Sterilní pumpička 10 ml

Indikace

ocucvers drops Relief jsou viskózním komfortním roztokem bez obsahu konzervantů pro lubrikaci a zvlhčení očí, ocucvers kapky Relief byly vyvinuty pro obnovení přirozené vlhkosti oka, čím se předchází symptomům suchého oka, jako pálení, slzičí unavené oči a pocit cizího tělesa v oku. ocucvers kapky Relief se mohou používat i s kontaktními čočkami jakéhokoliv typu a materiálu.

Dávkování, postup a doba používání

- Kontaktujte svého oftalmologa nebo optika v případě, že máte potřebu kapat více než 10 kapek denně.
- ocucvers kapky Relief se mohou používat 6 měsíců po prvním otevření.
- při aplikaci ocucvers kapek Relief nezaklánejte hlavu dozadu.

Důležité informace při používání ocucvers kapek Relief

- Produkt nepoužívejte, pokud je uzávěr jakýmkoliv způsobem poškozen.
- Uchytení pumpičky může být problematické, pokud se roztok dostane do kontaktu s prsty. Před dalším použitím si umyjte ruce.
- Nepoužívejte jako čističí roztok pro kontaktní čočky.
- Nikdy nepřikládejte špičku kapátka k jiným povrchům.
- ocucvers kapky Relief skladujte v chladničce nebo v pokojové teplotě.
- V případě, že produkt nepoužíváte delší dobu nebo už byla pumpička ve vertikální poloze, přičemž špička směřovala směrem dolů, je třeba znovu nastavit pumpičku. V takovém případě, si přečtěte instrukce pro první použití ocucvers kapek Relief.
- Nepoužívejte po době expirace.
- **Skladujte mimo dosahu dětí.**
- V případě, že používáte ocucvers kapky Relief spolu s jinými roztoky, gely nebo mastičkami pro oční použití, např. oční kapky, gely, mastičky, roztoky pro kontaktní čočky nebo používáte nové kontaktní čočky - počkejte nejméně 30 minut před aplikací ocucvers kapek Relief.
- Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoliv složku produktu ocucvers kapek Relief.

Vedlejší účinky

Možná rizika, vedlejší účinky nebo komplikace spojené s používáním očních kapek jsou: alergická reakce, zápalová reakce nebo infekce. V případě, že zaznamenáte jakýkoliv problém, kontaktujte svého optika nebo oftalmologa.

Zdravotnická pomůcka

Status: 07.2019



ocucvers drops Relief

Očné kvapky s obsahem hyaluronátu sodného 0.21%

Zloženie

Sterilný izotonický roztok s obsahom čistej vody, chloridu sodného, chloridu vápenatého, chloridu horečnatého, forforečnanu sodného, citrátu konzervant, sorbitolu a hyaluronátu sodného 2,1mg/ml. Neobsahuje BPA (bisfenol A), ftalátz ani borátové konzervanty.

Bez konzervantov

Forma a obsah

Sterilná pumpička 10 ml

Indikácie

ocucvers kvapky Relief sú viskóznym komfortným roztokom bez obsahu konzervantov pre lubrikáciu a zvlhčenie očí, ocucvers kvapky RELIEF boli vyvinuté pre obnovenie prirodzenej vlhkosti oka, čím sa predchádza symptómom suchého oka, ako pálenie, slziace unavené oči a pocit cudzieho telesa v oku. ocucvers kvapky Relief sa môžu používať aj s kontaktnými šošovkami akéhokoľvek typu a materiálu.

Dávkovanie, postup a doba použitia

- Kontaktujte svojho oftalmológa alebo optika v prípade, že máte potrebu kvapkať viac ako 10 kvapiek denne.
- ocucvers kvapky Relief sa môžu používať 6 mesiacov po prvom otvorení.
- pri aplikácii ocucvers kvapky Relief nezakláňajte hlavu dozadu.

Dôležité informácie pri používaní ocucvers kvapky Relief

- Produkt nepoužíajte ak je uzáver akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Uchytenie pumpičky môže byť problematické, ak sa roztok dostane do kontaktu s prstami. Pred dalším použitím si umyte ruky.
- Nepoužíajte ako čistiaci roztok pre kontaktné šošovky.
- Nikdy nepřikládejte špičku kvapkadla k iným povrchom.
- ocucvers kvapky Relief skladujte v chladničce alebo pri izbovej teplote.
- V prípade, že produkt nepoužívate dlhšiu dobu alebo už bola pumpička vo vertikálnej polohe, pričom špička smerovala nadol je potrebné znovu nastaviť pumpičku. V takom prípade, viď inštrukcie pre prvé použitie ocucvers kvapky Relief.
- Nepoužíajte po dobu expirácie.
- **Skladujte mimo dosahu detí.**
- V prípade, že používate ocucvers kvapky Relief spolu s inými roztokmi, gélni alebo mastičkami pre očné použitie, napr. očné kvapky, gély, mastičky, roztoky pre kontaktné šošovky alebo používate nové kontaktné šošovky - počkajte najmenej 30 minút pred aplikáciou ocucvers kvapky Relief.
- Nepoužíajte v prípade alergie na akúkoľvek zložku produktu ocucvers kvapky Relief.

Vedľajšie účinky

Možné riziká, vedľajšie účinky alebo komplikácie spojené s používaním očných kvapiek sú: alergická reakcia, zápalová reakcia alebo infekcia. V prípade, že zaznamenáte akýkoľvek problém, kontaktujte svojho optika alebo oftalmológa.

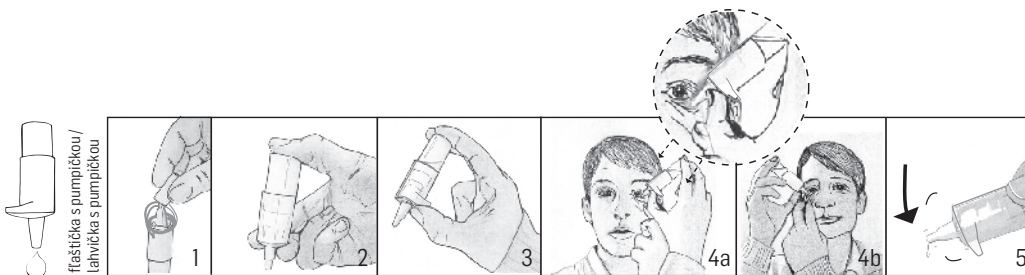
Zdravotnícka pomôcka

CZ**Aplikace**

1. Odstraňte ochranné víčko.
2. Před prvním použitím ocervers kapek Relief otočte lahvičku vertikálně a směřujte kapátko k zemi. Opakovaně stlačujte spodní část pumpičky až dokud nekápnou první kapka. Následně můžete produkt použít.
3. Pro kapání ocervers kapek Relief umístěte pumpičku mezi palec a ukazovák, přičemž špička palce bude tlačit na žebrovanou část okolo špičky a ukazovák zatlačí na spodek pumpičky. Pro zajištění uchycení položte prostředník vedle ukazováku.
4. Hlavu nezaklánějte dozadu a mírně natáhněte spodní víčko, přičemž spodek pumpičky míří směrem nahoru. Aplikujte jednu kapku do vnitřku spodního víčka a do vnějšího koutku oka, tedy do koutka vzdálenějšího od nosu. Opakovaně mrkejte kvůli rovnoměrnému nanesení očních kapek po povrchu oka.
5. Po použití se ubezpečte, že špička pumpičky je suchá tím, že pumpičkou zatřesete a následně uzavřete ochranné víčko. Nikdy nepřikládajte špičku kapátka k jiným povrchům, abyste se vyhnuli kontaminaci produktu.

SK**Aplikácia**

1. Odstráňte ochranný uzáver.
2. Pred prvým použitím ocervers kvapky Relief otočte fľaštičku vertikálne smerujúc kvapkadlo k zemi. Opakovane stlačajte spodnú časť pumpičky až kým nekvapne prvá kvapka. Následne môžete produkt použiť.
3. Pre kvapkanie ocervers kvapiek Relief umiestnite pumpičku medzi palec a ukazovák, pričom špička palca bude tlačiť na rebrovanú časť okolo špičky a ukazovák zatlačí na spodok pumpičky. Pre zaistenie uchytienia položte prostredník vedľa ukazováka.
4. Hlavu nezakláňajte dozadu a mierne natiahnite spodné viečko, pričom spodok pumpičky mieri smerom nahor. Aplikujte jednu kvapku do vnútra spodného viečka a do vonkajšieho kútika oka, teda do kútika vzdialenejšieho od nosa. Opakovane žmurkajte pre rovnomerné naniesenie očných kvapiek po povrchu oka.
5. Po použití sa uistite, že špička pumpičky je suchá tým, že pumpičkou zatrasiete a následne uzavriete ochranný uzáver. Nikdy neprikladajte špičku kvapkadla k iným povrchom, aby ste sa vyhlili kontaminácii produktu.

**Distributor / Distribútor**

innomedis AG
medical care
P.O. Box 501413
D-50974 Cologne
info@ocervers.eu

**Výrobce / Výrobca**

Consol AB
Krokslättsgatan 7
P.O. Box 2094
SE-431 02 Mölndal
SWEDEN



Prečítajte si návod na použitie |
Přečtěte si návod k použití



Skladujte pri teplote od 4 do 30°C |
Skladujte při teplotě od 4 do 30°C

STERILE A

Sterilní aseptická náplň produktu |
Sterilní aseptická náplň produktu



Môže sa používať až 6 mesiacov po prvom použití |
Lze použít až 6 měsíců po prvním použití



Výrobca
Výrobce



Očné kvapky
Očné kapky



Jedna fľaštička obsahuje 330 kvapiek |
Jedna lahvička obsahuje 330 kapek



Fľaštička s pumpičkou. Pred použitím si prečítajte návod na použitie |
Lahvička s pumpičkou. Před použitím si přečtěte návod k použití

CE 0413 DPK-000780-00

8000245_PIL_REV03_20180709